

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل

قرار دادن نمونه خون در سرما: (رعایت زنجیره سرد)

آزمایش گازهای خونی، آمونیاک، استون، اسیدهای چرب، پیروات، گلوکاگون، گاسترین، پاراتورمون، هورمون محرک آدرنال، رنین، کاتکول آمین ها، هموسیستین، آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین، فاکتور ۵ و فاکتور ۸ نیاز به رعایت زنجیره سرد دارند بدین مفهوم که لوله حاوی نمونه در ظرف حاوی یخ خرد شده همراه با آب قرار میگیرد. قرار دادن لوله آزمایش در ظرف حاوی یخ خرد شده به این علت که سرما به صورت یکنواخت پخش نمیشود قابل قبول نیست.